



SCANNER POUR PLUS D'INFO !


LUNA[®] X5

ENSEMBLE, ÉLEVONS LE SOIN



J'installe mon moteur LUNA[®] X5 en mode nomade


1 Je règle mon bras d'extension selon mes besoins pour travailler en toute ergonomie

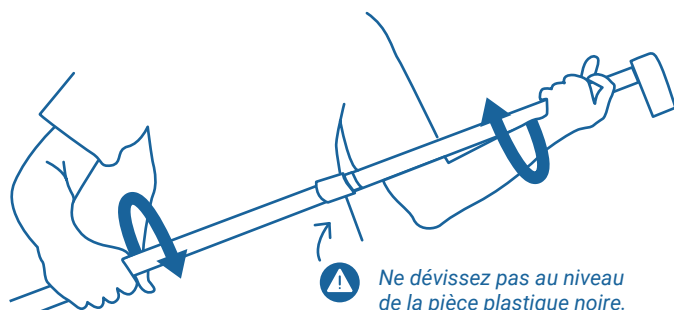

- a** Tenez fermement la perche, une main sur chaque tube.
- b** Tournez la partie haute dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la longueur variable (vous pouvez tenir la perche par l'extrémité)
- c** Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller à la longueur souhaitée


2 J'installe la sangle du moteur dans le bras d'extension

Déroulez la longueur de sangle nécessaire sur le moteur, toujours placé dans le chariot


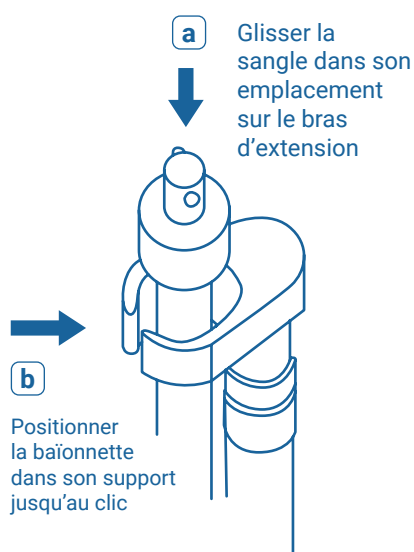


3 Je me positionne bien pour accrocher le moteur

Tenez bien la perche à la verticale, perpendiculairement au rail

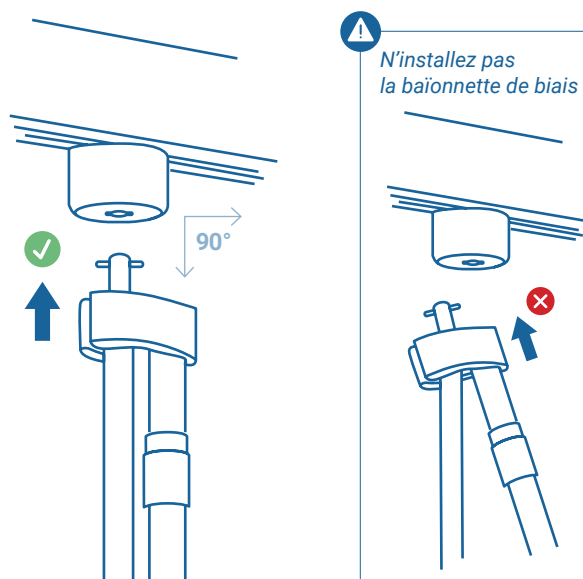


4 J'accroche le moteur

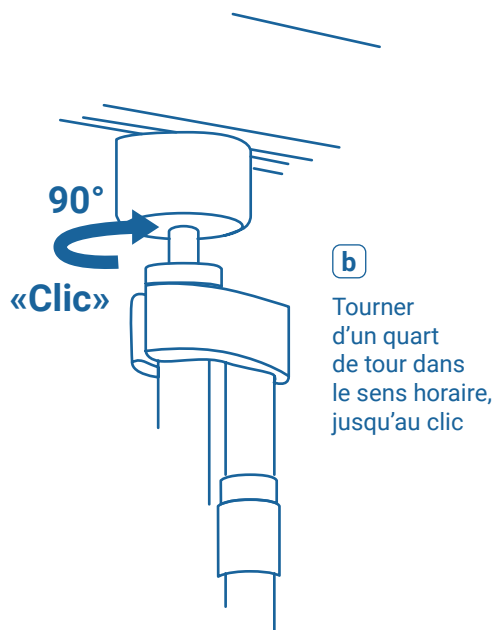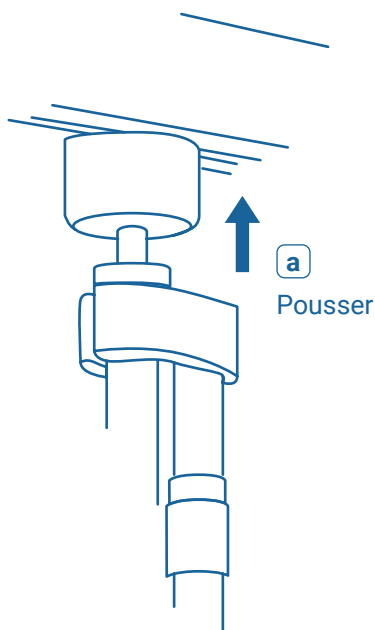

5 Je vérifie que mon moteur est bien installé

pour un transfert en toute sécurité

Tirez vigoureusement sur la sangle en effectuant une traction latérale, comme lors d'un transfert (ex. gauche/droite, avant/arrière)

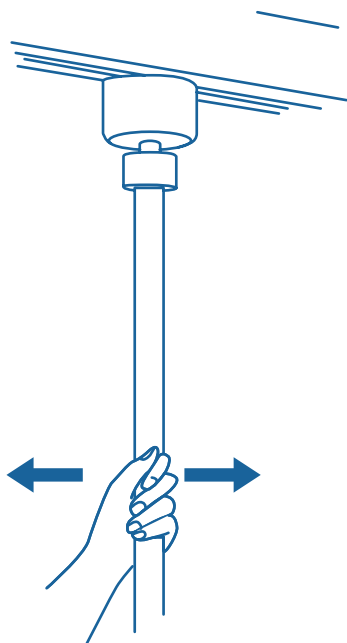

⚠ Vérifiez toujours que le LUNA® X5 est correctement monté avant utilisation


6 Désinstallation

Pour la désinstallation, suivez les mêmes étapes dans l'ordre inverse.

Conseils LUNA® X5

Charge

Veillez à **TOUJOURS** mettre le LUNA® X5 en charge après utilisation en branchant le câble de charge sur le panneau de contrôle du moteur.

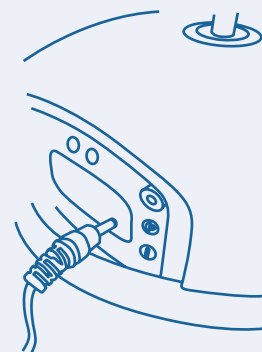

Référents d'établissement

A l'issue des formations à l'utilisation, **nommez au moins 2 référents sur chaque site** pour qu'ils deviennent eux-mêmes des relais et des formateur(s) vis-à-vis de leurs collègues, en particulier pour les nouveaux arrivants.