



Mini-guide d'utilisation

Transfert sur rail

LUNA[®] X5

ENSEMBLE, ÉLEVONS LE SOIN

DESIGN . SIMPLICITÉ . DURABILITÉ . ÉCOCONCEPTION





Mini-guide d'utilisation

Astuces

Veillez à **TOUJOURS** mettre le LUNA® X5 en charge après utilisation en :

- Plaçant la télécommande dans la station de charge.
- Branchant le câble de charge sur le panneau de contrôle du moteur
(si l'installation de rails est équipée de la recharge permanente ou ITC*, la recharge est automatique).

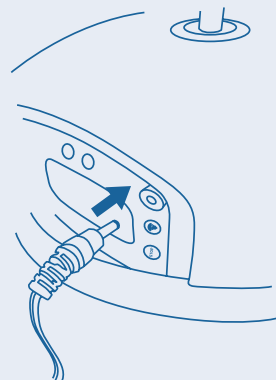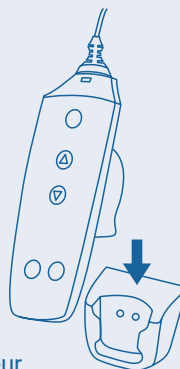

Ne tirez pas sur le câble de la télécommande pendant le transfert.



Ajustez la hauteur du lit médicalisé pour faciliter le transfert.



Utilisez la taille de harnais adaptée à chaque résident.



Placez le bras d'extension à la verticale lors de l'installation.

Questions fréquentes

Que faire si la télécommande ne fonctionne pas ?

- Vérifiez que l'arrêt d'urgence n'est pas activé (*si c'est le cas, utilisez le bouton Reset*).
- Assurez-vous que la télécommande est bien branchée.
- Vérifiez le niveau de batterie du moteur.

Pourquoi le voyant du chargeur clignote-t-il ?


- Le voyant vert du chargeur clignote lorsque le moteur n'est pas en charge.
- Placez la télécommande sur la station de charge et assurez-vous qu'elle est bien enclenchée.



*ITC = In Track Charging (Recharge permanente)

Mini-guide d'utilisation

Télécommande

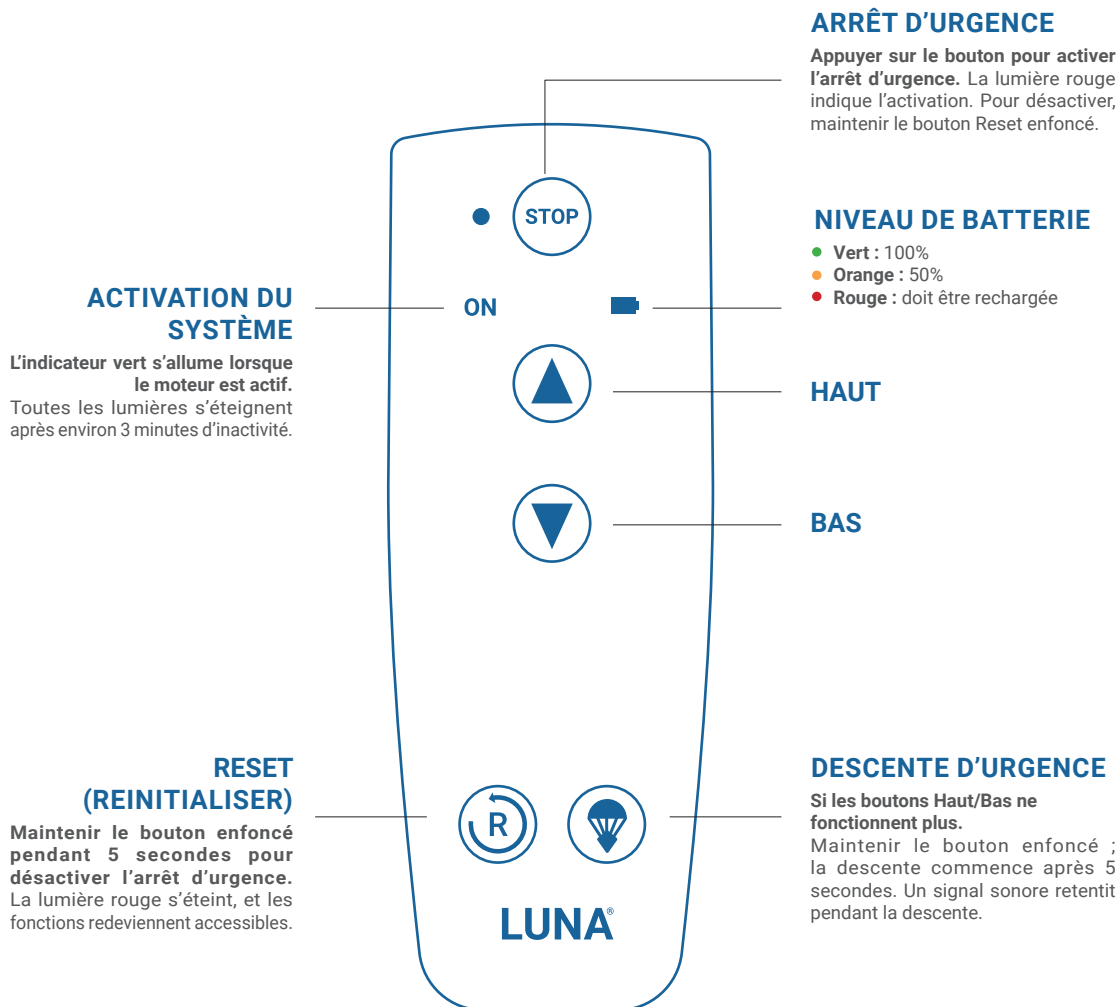

Mini-guide d'utilisation

Moteur

NIVEAU DE BATTERIE

- Vert : 100%
- Orange : 50%
- Rouge : doit être rechargée

HAUT

BAS

PRISE CÂBLE DE RECHARGE

DESCENTE D'URGENCE

Utiliser uniquement si la descente normale n'est pas possible.

Si les boutons Haut/Bas ne fonctionnent plus.

Maintenir le bouton enfoncé ; la descente commence après 5 secondes. Un signal sonore retentit pendant la descente.

INDICATEUR DE MAINTENANCE

 **Jaune**

Il reste 1 mois avant la maintenance annuelle (s'affiche pendant 30 sec. à l'activation).

 **Orange**

Maintenance annuelle dépassée d'un mois (reste allumé en veille + la mise en veille).

 **Orange + Bip**

Maintenance annuelle dépassée de 2 mois (reste allumé en veille + 3 bips à l'activation).

ARRÊT D'URGENCE

Appuyer sur le bouton pour activer l'arrêt d'urgence. La lumière rouge indique l'activation. Pour désactiver, maintenir le bouton Reset (6) enfoncé.

BRANCHEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

CHARGE

● Vert
Le lève-personne est réglé sur la capacité de charge sélectionnée.

● Rouge
La charge dépasse la limite sélectionnée. Seule la descente est possible pour des raisons de sécurité.




L'affichage principal s'adapte automatiquement à l'orientation du moteur lorsque celui-ci est retourné pour assurer une lecture facile des indicateurs.

Comment déplacer votre moteur d'une chambre à l'autre ?


Pour convertir votre moteur du mode fixe au mode nomade ...
(ou inversement)

- **En mode fixe,**
Le moteur est monté directement dans le rail.
- **En mode nomade,**
Le moteur est monté dans le rail au niveau de la sangle.


...vous n'avez qu'à le retourner.

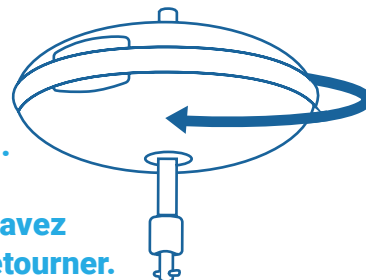

Mode fixe relocalisable

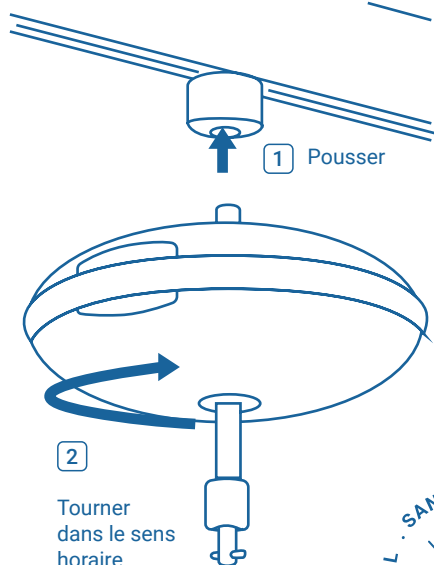

Mode nomade

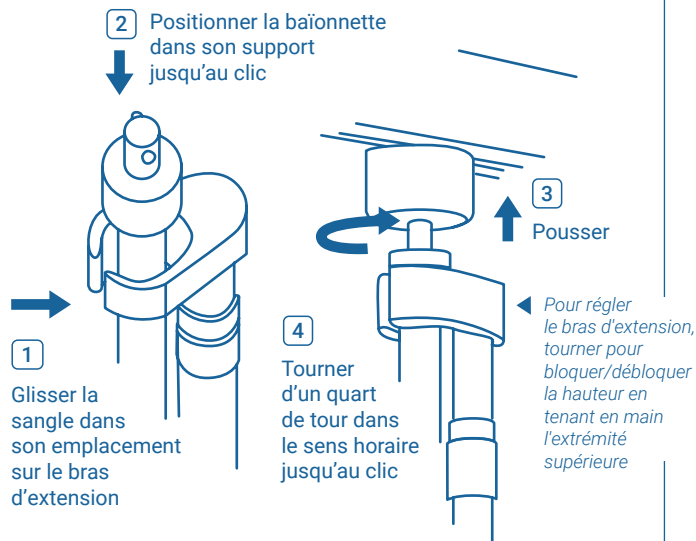

Pour une manipulation encore plus simple, exercer une légère tension sur la sangle lors de ces étapes.



Vérifiez toujours que le LUNA® X5 est correctement monté avant utilisation.

Tirez vigoureusement sur la sangle en effectuant une traction latérale, comme lors d'un transfert (ex. gauche/droite, avant/arrière)





SCANNER POUR
PLUS D'INFOS !



 CFS 150 / 200 / 275 kg (selon réglage)

 
Dispositif médical de classe I