




SCANNER POUR PLUS D'INFO !

## Notice simplifiée

### TÉLÉCOMMANDE

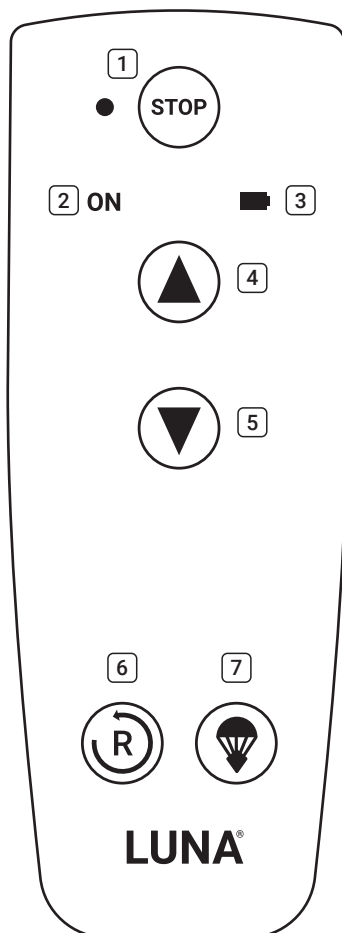

#### 1 ARRÊT D'URGENCE

Appuyer sur le bouton pour activer l'arrêt d'urgence. La lumière rouge indique l'activation. Pour désactiver, maintenir le bouton Reset (6) enfoncé.

#### 2 ACTIVATION DU SYSTÈME

L'indicateur vert s'allume lorsque le moteur est actif. Toutes les lumières s'éteignent après environ 3 minutes d'inactivité.

#### 3 NIVEAU DE BATTERIE

- Vert : 100%
- Orange : 50%
- Rouge : doit être rechargée

#### 4 HAUT

#### 5 BAS

#### 6 RESET (REINITIALISER)

Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver l'arrêt d'urgence. La lumière rouge s'éteint, et les fonctions redeviennent accessibles.

#### 7 DESCENTE D'URGENCE

Si les boutons Haut/Bas ne fonctionnent plus. Maintenir le bouton enfoncé ; la descente commence après 5 secondes. Un signal sonore retentit pendant la descente.


#### Important

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veiller à le remettre en charge systématiquement en :

- Plaçant la commande manuelle dans la station de charge.
- Connectant le câble de charge au panneau latéral.

ou

Si votre système de rails est équipé de la technologie de Recharge Permanente ITC (In-Track Charging), la recharge s'effectue automatiquement.

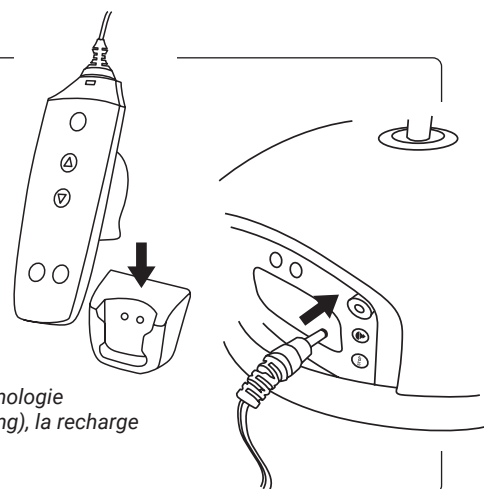

#### Descente d'urgence

Si la descente d'urgence électrique ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la descente d'urgence manuelle en suivant les étapes ci-dessous :

- a Retirer la clé d'urgence située sur le côté du LUNA<sup>®</sup> X5.
- b Insérer la clé d'urgence manuelle dans l'orifice prévu à cet effet.
- c Tourner la clé d'urgence manuelle dans le sens antihoraire pour effectuer la descente manuelle.

